

LVR-Johanniterschule · Johannerstraße 103 - 105 · 47053 Duisburg

Datum und Zeichen bitte stets angeben

An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten der Pri-  
marstufe der LVR-Johanniterschule Duisburg

07.04.2021

Herr Röhrig  
Tel 0203600593  
Fax 020360059 422  
walter.roehrig@lvr.de  
johanniter-duisburg@lvr.de

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

mit meinem **21. Elternbrief** zum Umgang mit der Corona-Pandemie möchte ich Sie über die aktuellen Regelungen des Schulministeriums NRW (MSB) zum Testangebot mit Corona-Schnelltests auch für Schüler\*innen der Primarstufe (Klasse 1-4) informieren.

Ab der ersten Woche nach den Osterferien wird auch den Schüler\*innen der Primarstufe (Klasse 1-4) ein Testangebot mit Corona-Schnelltests gemacht.

**Pro Woche** werden dann allen Schüler\*innen ab Klasse 1 **zwei** freiwillige Selbsttest zur Verfügung gestellt.

Diese Selbsttests werden nicht in der Schule durchgeführt, da Ihre Kinder bei einem positiven Ergebnis nicht im Schülerspezialverkehr mit anderen Schüler\*innen gemeinsam nach Hause gebracht werden könnten. Wir bitten Sie Ihre Kinder bei der Durchführung der Selbsttests zu Hause anzuleiten.

Hierzu finden Sie über folgenden Link im Internet ein sehr gutes Erklär-Video:

<https://youtu.be/8P-izXYIvBQ>

Dieses Video finden Sie auch auf unserer Homepage.

Bei den zur Verfügung gestellten Schnelltests handelt es sich weiterhin um die sog. PoC-Schnelltests der Fa. Roche, die innerhalb von 15-30 Minuten Aufschluss darüber geben, ob Ihr Kind zum Zeitpunkt der Testung infektiös ist.

Das Ergebnis des Selbsttests ist wie folgt zu interpretieren:

- **Negativ** (=KEINE INFEKTION): Kontrolllinie (C) ist sichtbar, aber keine Testlinie (T)

**Ihre Meinung ist uns wichtig!**

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  
E-Mail: [anregungen@lvr.de](mailto:anregungen@lvr.de) oder [beschwerden@lvr.de](mailto:beschwerden@lvr.de), Telefon: 0221 809-2255

- **Positiv** (=INFEKTION): Testlinie (T) ist zusammen mit einer Kontrolllinie (C) sichtbar.
- **Ungültig**: keine Kontrolllinie (C) sichtbar

**Bei einem positiven Testergebnis darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen! Sie müssen sich dann an Ihren Haus- oder Kinderarzt zwecks Durchführung einer weiteren Testung wenden.**

**Im Fall eines positiven Testergebnisses informieren Sie bitte unverzüglich unser Sekretariat mit Angabe des Namens, des Testdatums und der Klasse Ihres Kindes.**

**Insofern Sie NICHT von dem Testangebot für Ihr Kind Gebrauch machen wollen, können Sie das u.a. Widerspruchsformular unterschreiben und Ihrem Kind wieder mit in die Schule geben.**

**Für diesen Fall bekommt Ihr Kind keinen Selbsttest zur Anwendung zu Hause ausgehändigt.**


Die Schüler\*innen ab Klasse 1, die in der Woche vom 12.04.2021 bis zum 16.04.2021 im Präsenzunterricht sind, bekommen die Schnelltests am Montag, den 12.04.2021 ausgehändigt.

Die Schüler\*innen ab Klasse 1, die in der Woche vom 19.04.2021 bis zum 23.04.2021 im Präsenzunterricht sind, bekommen die Schnelltests am Montag, den 19.04.2021 ausgehändigt.

In jedem der Ihren Kindern ausgehändigten Umschläge finden Sie 2 komplette Schnelltests und eine Durchführungsanleitung (siehe Bild Seite 3).

Ich bedanke mich herzlich für Ihr Verständnis und das uns entgegengebrachte Vertrauen! Bleiben Sie gesund!

Gez.  
Walter Röhrig  
Schulleiter

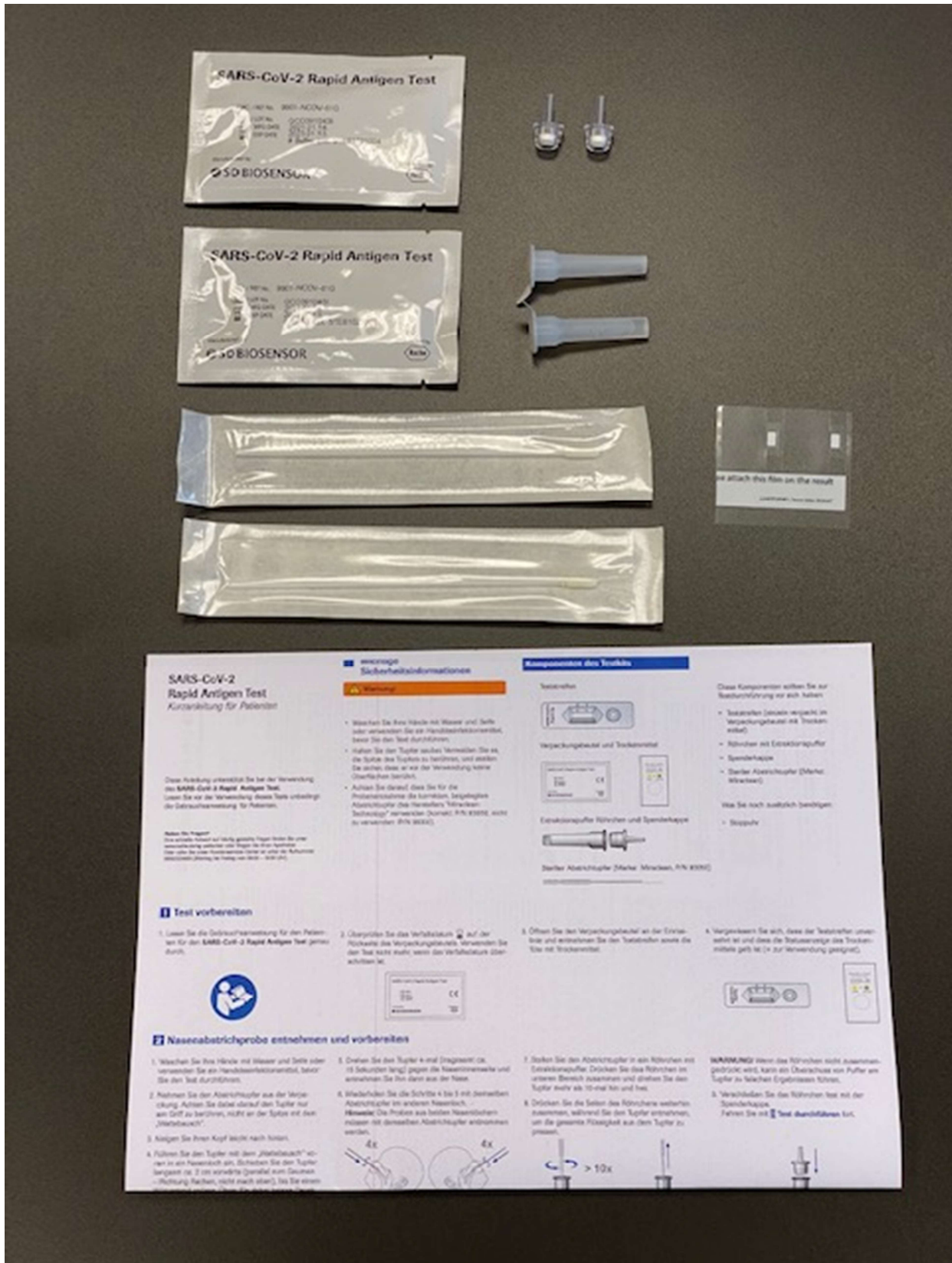

**SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test**  
Kurzanleitung für Patienten

**wichtige**  
Sicherheitsinformationen

**1. Vorbereitung**

- Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor Sie den Test durchführen.
- Nehmen Sie den Teststreifen heraus, nachdem Sie es, die Spitze des Teststreifens zu reinigen, und stellen Sie sicher, dass es vor der Verwendung keine Oberflächen berührt.
- Achten Sie darauf, dass Sie für die Probensammlung die korrekten, beigefügten Abstrichspitzen (das Hersteller-Verfahren "Technology" verwenden (Dokument: PIN 83398) nicht zu verwenden (PIN 83393).

**2. Test vorbereiten**

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für den Patienten für den SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test genau durch.
- Überprüfen Sie das Verfallsdatum auf der Rückseite des Verpackungsbereichs. Verwenden Sie den Test nicht mehr, wenn die Verfallsdatum überschritten ist.

**3. Nasenabstrichprobe entnehmen und vorbereiten**

- Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor Sie den Test durchführen.
- Nehmen Sie den Abstrichspitzer aus der Verpackung. Achten Sie dabei darauf, den Teststreifen nur am Griff zu berühren, nicht an der Spitze mit dem Abstrichspitzer.
- Nägeln Sie Ihren Kopf leicht nach hinten.
- Füllen Sie den Teststreifen mit dem "Zweiabstrich" von einem Patienten ein, drücken Sie den Teststreifen langsam ca. 2 cm einwärts (geradlinig zum Gesichts-Richtung) hinein, nicht nach unten, bis Sie einen Widerstand spüren.
- Drehen Sie den Teststreifen 4-mal (gegen den Uhrzeigersinn) gegen die Nasenrinne und entfernen Sie ihn dann aus der Nase.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 mit demselben Abstrichspitzer im anderen Nasenloch. **Wichtig:** Das Protein aus beiden Nasenlöchern mischen mit demselben Abstrichspitzer andrehen werden.
- Stoßen Sie den Abstrichspitzer in ein Röhrchen mit Extraktionspuffer. Drücken Sie das Röhrchen im unteren Bereich zusammen und drücken Sie den Teststreifen mehr als 10-mal hin und her.
- Drücken Sie die Seiten des Röhrchens weiterhin zusammen, während Sie den Teststreifen, um die gesamte Flüssigkeit aus dem Teststreifen zu pressen.

**4. Interpretieren Sie die Ergebnisse**

Das Testergebnis wird innerhalb von 15 Minuten sichtbar. Ein positives Ergebnis zeigt zwei farbige Linien an (eine Testlinie und eine Kontrolllinie). Ein negatives Ergebnis zeigt nur eine farbige Linie an (eine Kontrolllinie). Keine farbige Linie zeigt ein ungültiges Ergebnis an.

**Wichtig:** Wenn die Röhrchen nicht zusammen gedrückt sind, kann ein Überschuss von Puffer am Teststreifen zu falschen Ergebnissen führen.

3. Verschließen Sie das Röhrchen fest mit der Sperrkappe. Fahren Sie mit **4. Test durchzuführen** fort.

## **Widerspruch zur Teilnahme meines Kindes am Corona-Schnelltestangebot des Landes NRW in der LVR-Johanniterschule**

Hiermit erkläre ich/ erklären wir, dass ich/wir die Teilnahme meines/unseres Kindes an dem Corona-Schnelltestangebot (Selbsttest) des Landes NRW **NICHT** wünschen.

**Name, Vorname des Kindes:** \_\_\_\_\_

**Klasse:** \_\_\_\_\_

**Klassenleitung:** \_\_\_\_\_

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten